

UTILISSIMI

Avvertenze e precauzioni per l'uso.

Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive. Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati **ESCLUSIVAMENTE** per la correzione della presbiopia "semplice". Gli occhiali premontati sono indicati esclusivamente per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, nè per la visione da lontano, nè per la protezione degli occhi. L'uso improprio, ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di occhiali può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il medico oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi. Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa". Gli occhiali per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari. La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà nel leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni.

La presbiopia si considera "semplice" quando per la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (le diottrie sono l'unità di misura della capacità visiva). La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio è diverso. L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare incurvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata. L'anisometropia è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.

Caratteristiche:

Gli occhiali UTILISSIMI sono costituiti da lenti infrangibili e di ottima qualità. La distanza interpupillare è di 62mm e le diottrie delle due lenti dello stesso occhiale sono uguali. Le montature in sono in materiali privi di agenti allergizzanti.

Conservazione:

Gli occhiali vanno conservati ad una temperatura compresa tra i -10° e +35°C nella propria custodia. Evitare l'esposizione prolungata al sole in quanto le temperature che possono essere raggiunte possono danneggiare la funzionalità dell'occhiale.

Pulizia:

Utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro e asciugare con un panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detergenti chimici aggressivi che possono compromettere la funzionalità dell'occhiale.



NON IDONEO
ALLA GUIDA
E USO SU STRADA



UTILISSIMI

ALLEGATO AL DECRETO OCCHIALI PREMONTATI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

- Dispositivo medico di classe I
Dir. 93/42 CEE alle avvertenze previste dalla
norma EN 14139:2010
Riferimento D.m. 26/11/2004
- Solo per visione da vicino e lettura
 - Solo esami regolari presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi (EN 14139)
 - Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo
 - Non destinato alla visione a distanza
 - Non destinato alla protezione dell'occhio

GUIDA UTENTE OCCHIALE PREMONTATO

Potere diottrico: riportato sull'occhiale
Distanza interpupillare 62mm

Distribuito da:

Aurigane Industrie srl
Via Mazzini n. 1/A
36040 Brendola (VI) - Italy
www.utilissimi.net