

# utilissimi

Gli specialisti della vista in Farmacia

## OCCHIALI PREMONTATI

### Avvertenze e precauzioni per l'uso.

Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive. Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati **ESCLUSIVAMENTE** per la correzione della presbiopia "semplice". Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi. L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di occhiali può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il medico oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi. Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa". Gli occhiali premontati per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari. La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà di leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni. La presbiopia si considera "semplice" quando per la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (le diottrie sono l'unità di misura della capacità visiva). La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio è diverso. L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata. L'anisometropia è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.

### Avvertenze

Gli occhiali premontati sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745.

### Conservazione e Pulizia

"Quando non in uso e per il trasporto conservare la montatura nella propria custodia originale ad una temperatura compresa tra i -10°C e +35°C"; Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto dell'auto) perché le temperature che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità della montatura. In caso di contatto occasionale con agenti come acqua salata (acqua del mare), acqua della piscina, prodotti chimici come cosmetici, lacca per capelli, creme solari e repellenti per insetti si consiglia la rimozione immediata con un panno morbido inumidito. In caso di usura (es. graffi, opacità) si consigliano ricambi originali per la sostituzione. Per la pulizia utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro e asciugare con un panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detergenti chimici aggressivi che possono compromettere la funzionalità degli occhiali.

MD

Gli occhiali da lettura Utilissimi sono un **DISPOSITIVO MEDICO**

**DI CLASSE I**

Prodotto conforme alla norma

**UNI EN 14139:2010**

al Regolamento **UE 2017/745**

e al **D.M. 26/11/2004**

Il codice del modello e il numero del lotto sono stampati all'interno dell'asta, preceduto dal simbolo LOT (indica settimana/anno)

LOT



**NON IDONEO ALLA  
GUIDA SU STRADA**

### Precauzioni per l'uso:

- Solo per visione da vicino e lettura
- Solo esami regolari per la vista presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi
- Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo
- Non destinato alla visione a distanza
- Non destinato alla protezione dell'occhio

### GUIDA UTENTE OCCHIALE PREMONTATO

Potere diottrico: riportato sugli occhiali

Distanza interpupillare 62 mm +/- 1 mm



**Aurigane S.r.l.**

Via dell'Economia, 32

36100 Vicenza (VI) - Italy

[www.utilissimi.net](http://www.utilissimi.net)

utilissimi

Gli specialisti della vista in Farmacia