

# utilissimi

Gli specialisti della vista in Farmacia

## OCCHIALI PREMONTATI

### Avvertenze e precauzioni per l'uso.

Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo e' necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive. Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati **ESCLUSIVAMENTE** per la correzione della presbiopia "semplice". Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, ne' per la visione da lontano, ne' per la protezione degli occhi. L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di occhiali può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso e' necessario un controllo oculistico. Solo il medico oculista e' in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi. Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa". Gli occhiali premontati per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari. La presbiopia e' caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà di leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni. La presbiopia si considera "semplice" quando per la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (le diottrie sono l'unita' di misura della capacità visiva). La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio e' diverso. L'astigmatismo e' un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata. L'anisometropia e' caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.

### Avvertenze

Gli occhiali premontati sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745.

### Conservazione e Pulizia

"Quando non in uso e per il trasporto conservare la montatura nella propria custodia originale ad una temperatura compresa tra i -10°C e +35°C"; Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto dell'auto) perché le temperature che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità della montatura.

In caso di contatto occasionale con agenti come acqua salata (acqua del mare), acqua della piscina, prodotti chimici come cosmetici, lacca per capelli, creme solari e repellenti per insetti si consiglia la rimozione immediata con un panno morbido inumidito. In caso di usura (es. graffi, opacità) si consigliano ricambi originali per la sostituzione. Per la pulizia utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro e asciugare con un panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detergenti chimici aggressivi che possono compromettere la funzionalità della funzionalità degli occhiali.

MD

Gli occhiali da lettura Utilissimi sono un **DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I**

Prodotto conforme alla norma **UNI EN 14139:2010**, al Regolamento **UE 2017/745** e al **D.m. 26/11/2004**

Il codice del modello e il numero del lotto sono stampati all'interno dell'asta, preceduto la simbolo LOT (indica settimana/anno)

LOT



**NON IDONEO ALLA GUIDA SU STRADA**

### Precauzioni per l'uso:

- Solo per visione da vicino e lettura
- Solo esami regolari per la vista presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi
- Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo
- Non destinato alla visione a distanza
- Non destinato alla protezione dell'occhio

### GUIDA UTENTE OCCHIALE PREMONTATO

Potere diottrico: riportato sugli occhiali  
Distanza interpupillare 62mm +/-1mm



**Aurigane S.r.l.**

Via dell'Economia, 32  
36100 Vicenza (VI) - Italy  
[www.utilissimi.net](http://www.utilissimi.net)

utilissimi

Gli specialisti della vista in Farmacia

## NOTA INFORMATIVA

### - UNI EN ISO 12312-1:2013

Gli occhiali da sole Igloo e Ciao sono DPI di Classe I, protegge da lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)

**Categoria dei filtri:** La categoria del filtro è indicata all'interno dell'asta, preceduta dalla dicitura "Cat." e può essere Cat.1 - Cat.2 - Cat.3. Nella tabella a lato sono indicati i valori di riferimento e la spiegazione di ciascuna categoria.

**Tipo di lente:** Policarbonato

**Assorbimento UV:** (280-380 nm) 100% UVA-UVB

### Restrizioni d'uso:

- Non adatto per la visione del sole; (o di eclissi solari)
- Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale
- Non adatto alla protezione degli occhi contro pericoli di impatti meccanici. In caso di impatto gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso e agli occhi
- Non adatto alla guida di notte o in condizioni di scarsa visibilità






### Avvertenze e precauzioni per l'uso:

Non sono previsti pezzi di ricambio, sostituire in caso di usura, riporre nella custodia o nell'astuccio in microfibra una volta terminato l'utilizzo.

### Pulizia:

Utilizzare un panno morbido e/o comuni detergenti per vetro. Non utilizzare solventi e abrasivi. L'uso scorretto di prodotti per la pulizia può danneggiare gli occhiali.

Ogni paio di occhiali riporta settimana/anno di produzione del lotto (es. Lot. 01/23)

Colore della lente	Categoria del filtro		
Lente Chiara	<b>0</b> TV80 + 100%		Riduzione molto limitata della luce solare
Lente leggermente colorata	<b>1</b> TV43 + 80%		Riduzione limitata della luce solare
Lente mediamente colorata	<b>2</b> TV18 + 43%		Buona protezione dalla luce solare
Lente scura	<b>3</b> TV6 + 18%		Elevata protezione dalla luce solare
Lente molto scura	<b>4</b> TV3 + 8%		Protezione molto elevata dalla luce solare estrema es. mare neve, montagna o deserto. Non adatto alla guida e all'uso su strada

**Aurigane S.r.l.**  
Via dell'Economia, 32  
36100 Vicenza (VI) - Italy  
[www.uttilissimi.net](http://www.uttilissimi.net)

**CE**

Prodotto conforme alle norme:

**UNI EN ISO 12312-1:2013**

**UNI EN ISO 12312-1:2013/A1:2015**  
ed al regolamento (UE) 2016/425

**igloo**

**Ciao**