

utilissimi

Gli specialisti della vista in Farmacia

GAFAS PREMONTADAS

Advertencias y precauciones de uso.

Con el fin de evaluar correctamente el alcance y la naturaleza de un defecto visual, es necesario un examen ocular previo. En cualquier caso, la valoración del defecto visual no puede basarse en el autodiagnóstico ni en la elección de las gafas que se consideren adecuadas para las aproximaciones sucesivas. Las gafas para presbicia premontadas, fabricadas industrialmente con lentes de idéntica potencia dióptrica, están indicadas EXCLUSIVAMENTE para la corrección de la presbicia «simple». Las gafas premontadas son adecuadas únicamente para ver de cerca. No se deben usar para conducir, para ver de lejos, ni para proteger los ojos. Utilizar las gafas de manera inadecuada o usar una graduación incorrecta puede provocar diversos trastornos de la visión, con posibles dolores de cabeza. En este caso es necesario realizarse un control oftalmológico. Solo el oftalmólogo puede evaluar el estado de salud de los ojos y el alcance de las alteraciones visuales. No deben utilizarse gafas para presbicia premontadas si la presbicia es del tipo «compleja». Las gafas para presbicia premontadas no mejoran la visión en caso de enfermedades oculares, tales como las cataratas o la degeneración macular. La presbicia se caracteriza por un debilitamiento fisiológico y progresivo de la visión que generalmente se manifiesta a partir de los 45 años mediante una serie de alteraciones tales como la dificultad para leer el periódico o distinguir bien objetos pequeños de cerca. La presbicia se considera «simple» cuando para corregir el defecto de la visión, ambos ojos necesitan el mismo número de dioptrías correctivas (las dioptrías son la unidad de medida de la capacidad visual). La presbicia se considera «compleja» si se presenta astigmatismo o anisometropía o cuando el número de dioptrías en cada ojo es diferente. El astigmatismo es un defecto de la visión que se debe a que la curvatura corneal es irregular, lo cual provoca una visión borrosa y distorsionada de las imágenes. El caso característico de la anisometropía es que cada ojo tiene un defecto refractivo diferente.

Advertencias

Las gafas premontadas cumplen con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745.

Cuidados y limpieza

“Cuando no utilice las gafas y para su transporte, guarde la montura en su estuche original a una temperatura entre -10°C y +35°C”; Evite la exposición al sol en ambientes cerrados no acondicionados (p. ej., el salpicadero de un automóvil) porque las temperaturas que se alcanzan en estas condiciones pueden dañar la funcionalidad de la montura. Si ocurre un contacto ocasional con agentes, tales como agua salada (agua de mar), agua de piscina, productos químicos, tales como cosméticos, lacas para el cabello, filtros solares y repelentes de insectos, se recomienda eliminar dichos elementos con un paño suave y húmedo. En caso de desgaste (p. ej., arañazos, falta de brillo), se recomienda sustituir las piezas dañadas con recambios originales. Para limpiar las gafas, utilice un paño húmedo y un detergente neutro normal. Seque con un paño suave y limpio. No utilice disolventes (p. ej., alcohol y acetona) ni detergentes químicos agresivos que puedan comprometer la funcionalidad de las gafas.

MD

Las gafas para leer Utilissimi son un **PRODUCTO SANITARIO DE CLASE I** que cumple con la norma **UNE-EN 14139:2010, el Reglamento UE 2017/745, y el Decreto Min. italiano del 26/11/2004**

El código del modelo y el número de lote están estampados en la parte interna de la pata, precedido del símbolo «LOT» (indica semana/año)

LOT



**NO APTO PARA
LA CONDUCCIÓN
POR CARRETERAS**

Precauciones de uso:

- Únicamente para ver de cerca y para leer
- Únicamente exámenes oculares frecuentes realizados por un profesional oftalmólogo pueden determinar si es necesario llevar gafas y el estado de salud de los ojos
- No destinado para conducir o manejar un vehículo
- No destinado para visión lejana
- No destinado para proteger el ojo

GUÍA PARA USUARIOS DE GAFAS PREMONTADAS

Potencia dióptrica: se indica en las gafas Distancia interpupilar 62 mm +/-1 mm



Aurigane S.r.l.
Via dell'Economia, 32
36100 Vicenza (VI) - Italy
www.utilissimi.net

utilissimi

Gli specialisti della vista in Farmacia

INFORMATION NOTE

- UNE-EN ISO 12312-1:2013

Las gafas de sol «Iglloo» y «Ciao» son equipo de protección individual (EPI) de Clase I, es decir que protegen frente a lesiones oculares provocadas por la exposición a la luz solar (distintas a las lesiones que resultan de mirar al sol)

Categoría de los filtros: La categoría del filtro se encuentra indicada en la parte interna de la pata, precedida por la indicación «Cat.», y puede ser Cat. 1 - Cat. 2 - Cat. 3. En la tabla a la derecha se indican los valores de referencia y la explicación de cada una de las categorías.

Tipo de lente: Policarbonato

Absorción UV: (280- 380 nm) 100% UVA-UVB

Restricciones de utilización:

- No es adecuado para observar el sol (o eclipses solares) - No es adecuado para proteger frente a fuentes de luz artificial

- No es adecuado para proteger los ojos frente a peligros de impactos mecánicos. En caso de impacto, estas gafas pueden romperse y ocasionar lesiones en el rostro y los ojos

- No es adecuado para conducir de noche o con condiciones de escasa visibilidad

Advertencias y precauciones de uso:

No se prevén piezas de recambio. Sustituir en caso de desgaste. Volver a colocar en el estuche o la bolsa de microfibra cuando no se las utilice.

Limpieza:

Utilizar un paño suave y/o detergentes comunes para vidrio. No utilizar disolventes ni abrasivos.

Utilizar productos no adecuados para limpiar las gafas podría dañarlas.

En cada par de gafas se indica la semana o el año de fabricación de su lote (p. ej., Lot. 01/23)

Categoría de filtro	
Lente transparente	0 TV80 + 100%
Lente ligeramente teñida	1 TV43 + 80%
Lentes de color medio	2 TV18 + 43%
Lente oscura	3 TV6 + 18%
Lente muy oscura	4 TV3 + 8%



Reducción muy limitada de la luz solar.

Reducción limitada de la luz solar.

Buena protección contra la luz solar.

Alta protección contra la luz solar

Protección muy alta contra la luz solar extrema, p. mar, nieve, montaña o desierto. No apto para conducción y uso en carretera.



Aurigane S.r.l.
Via dell'Economia, 32
36100 Vicenza (VI) - Italy
www.uttilissimi.net



El producto cumple con las normas a continuación: **UNE-EN ISO 12312-1:2013**
UNE-EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, y el **Reglamento (UE) 2016/425**

iglloo

Ciao